

Инструкция по сбору генетического материала

1 Подготовка

- За 1,5-2 часа воздержитесь от еды, чистки зубов и курения
- Перед сбором генетического материала вымойте руки и прополощите рот тёплой водой
- Если вам необходимо собрать генетический материал у младенца, сначала дайте ему попить теплой воды и проводите процедуру не раньше, чем через 30 минут после кормления


Не прикасайтесь к используемой части зонда, чтобы не занести на него посторонний биологический материал



2 Забор генетического материала

- Вскройте зонд с ватным наконечником из упаковки, не прикасаясь к нему
- Откройте крышку и вытяните зонд из пробирки за ручку-держатель
- Проведите ватным наконечником по внутренней стороне щеки с лёгким нажимом, вращая ее вокруг своей оси, 20-30 раз в течение 30 секунд

Ваша цель – собрать не слюну, а клетки эпителия

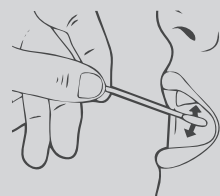

- Отложите использованный зонд на 7-10 минут для высыхания, не допуская контакта с поверхностями
- Соберите материал со второй щеки оставшимися зондами

Не кладите зонд сразу в конверт – просушите его на листке бумаги не менее 10 минут



- Поместите зонды в специальный конверт из комплекта (возвращать зонд в пробирку не нужно)
- Отрежьте выступающие из конверта кончики зондов, чтобы ватные части остались в конверте
- Закройте конверт и опечатайте его специальной наклейкой

3 Отправка материала

Обязательно напишите на конверте с ДНК-материалом ваш лабораторный код

После выполнения всех пунктов можно отправлять генетический материал в лабораторию MyGenetics

Конверт с генетическим материалом отправьте по адресу:



630090 г. Новосибирск,
Ул. Николаева,12
Компания MyGenetics



8 (800) 500 11 02
mygenetics.ru
info@mygenetics.ru