



Инструкция по сбору генетического материала

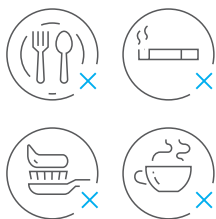

1 Подготовьтесь к сбору генетического материала

- За 1,5-2 часа воздержитесь от еды, чистки зубов и курения
- Перед сбором генетического материала прополощите рот теплой водой и вымойте руки
- ★ Для сбора генетического материала у младенца: проводите процедуру не ранее, чем через 30 минут после кормления, предварительно дав ребенку попить теплой воды

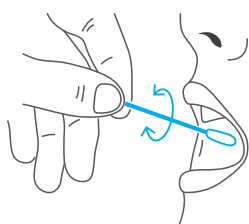

2 Соберите генетический материал


- Достаньте зонд с ватным наконечником из упаковки: откройте крышку и вытяните зонд из пробирки за ручку-держатель

Не прикасайтесь к ватному наконечнику, чтобы не занести на него посторонний биологический материал

- Вращающими движениями с легким нажимом поводите ватным наконечником по внутренней стороне щеки (нужно сделать 20-30 вращений в течение 30 секунд)

Ваша цель – собрать клетки с внутренней стороны щеки, а не слюну

- Дайте зонду просохнуть не менее 10 минут: **не допускайте контакта ватного наконечника с окружающими поверхностями**
- Повторите процедуру с оставшимися зондами, собрав генетический материал со второй щеки

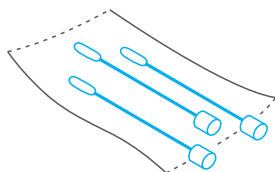


3 Отправьте конверт в лабораторию

- Возьмите маленький зеленый конверт из комплекта и введите номер штрихкода с данного конверта в вашем личном кабинете
- Поместите зонды в маленький зеленый конверт из комплекта (возвращать их в пробирки не нужно)
- Отрежьте выступающие из конверта части зондов чтобы ватные наконечники остались в конверте
- Закройте конверт и поместите его в большой белый для отправки

Не кладите зонды в конверт сразу – дайте им просохнуть не менее 10 минут

- Вызовите курьера из личного кабинета, для отправки генетического материала в лабораторию

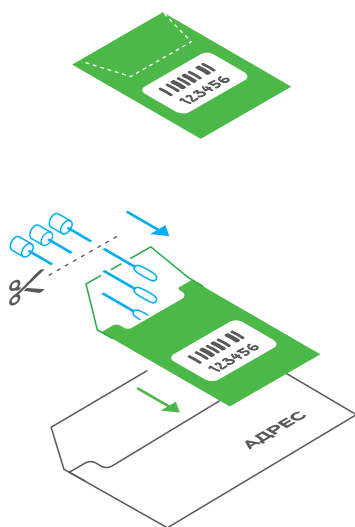

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы на любом из этапов

8 800 500 91 16 | mygenetics.ru | info@mygenetics.ru